

## Návod k použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan 75 g

Před použitím zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan si pečlivě prostudujte tento návod.

### Poznámky:

- Návod k použití ALPA Active gel kaštan by měl být považován za součást zdravotnického prostředku.
- Tento návod k použití by měl být uchováván po celou dobu použitelnosti zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan.

### Popis zdravotnického prostředku / účel použití:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan je určen pro léčbu a zmírnění bolestí u onemocnění spojených s poruchami mikrocirkulace krve v nohou, bolestí a otoky nohou (tzv. těžké nohy).

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan je určen pro širokou škálu uživatelů bez jakýchkoliv zvláštních omezení, pokud jde o délku používání.

### Popis mechanismu účinku ALPA Active gel kaštan, vlastnosti z hlediska účinnosti a očekávané klinické přínosy:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan má vhodné kluzné vlastnosti díky své viskozitě a hustotě.

Tyto parametry zajišťují optimální přenos sil při masáži, což má za následek pozitivní vliv na zlepšení krevního oběhu v nohách, zejména v okolí lýtek.

Viskozita a hustota zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan jsou vhodně zvoleny specificky pro masáž dolních končetin. Masáž nohou by měla být prováděna posuvnými pohyby zdola nahoru. Poté následuje aktivace žilních chlopní a cirkulace. Masáž prováděná tímto způsobem snižuje příznaky mikrocirkulačních poruch dolních končetin, jako je bolest, otok a pocit těžkosti.

Masáž by měla být prováděna až do prvních známek absorpce a vymizení gelu.

Fyzikální vlastnosti ALPA Active gel kaštan zabezpečují terapeutický účinek. Gel obsahuje základní látky na bázi vody, lihu, mentolu, ricinového oleje, gelotvorné přísady a extraktu kaštanu. Jeho unikátní chemické složení stanovuje viskozitu a hustotu gelu a zajišťuje tak dostatečný skluz při masáži. Obsah kaštanu také poskytuje další efekt v podobě příjemné a uvolňující vůně.

### Způsob použití:

Gel je určen k zevnímu použití. Podle potřeby naneste na dlaň vhodné množství gelu vzhledem k velikosti masírovaného povrchu.

Vmasírujte gel do prvních příznaků absorpce, několikrát denně. Masáž by měla být prováděna odspodu k horní části dolních končetin posuvnými pohyby.

Po vymizení symptomů lze gel používat ještě po několik dní.

**POZNÁMKA; použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan chrání pokožku před oděrem a jinými poškozeními, které mohou vzniknout při masáži bez použití kluzných látek.**

### Kontraindikace:

- Alergie na některou z obsažených složek.
- Neaplikujte na rány a poškozenou kůži.
- Nevhodné pro děti do 3 let.

### Upozornění:

- Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě vzniku jakýchkoli komplikací se poraďte s ošetřujícím lékařem.
- Neaplikujte na oči a sliznice.
- Nepoužívat v případě poškození plomby na tubě.
- Při použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan nebyly popsány nežádoucí žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti atp. Lehké kožní podráždění (svědění) u precitlivělých osob není na závadu.
- Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členskému státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz)).

### Složení:

25 % Alcohol Denat., 6 % Aesculus Hippocastanum Seed Extract, 1 % Lubrajel Oil (Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer), 0,7 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 0,5 % Menthol, 0,2 % Camphor, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Cinnamal, Citral, Eugenol, d-Limonene, Linalool, CI 19140, CI 15985, CI 28440, CI 73015, CI 14720.

### Podmínky použití, skladování, dopravy a likvidace:

Skladujte v suchu, při teplotě 5–25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, poté zlikvidujte.

Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu.

**Balení:**

Tuba 75 g

**Výrobce:**

ALPA, a.s.






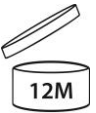


Hornoměstská 378

594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

www.alpa.cz

**Vysvětlení použitých symbolů:**

	Výrobce		Čtěte návod k použití
	Číslo výrobní dávky		Datum expirace
	Chránit před slunečním zářením		Po otevření použijte do 12 měsíců
	Omezení teploty při skladování a přepravě		Zdravotnický prostředek

Návod k použití, rev. 3.0, datum: 25.05.2021