

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego  
**VENO TERAPIA żel NES PHARMA®,  
żel z ekstraktem kasztanowca, 75 g**

poprawę krążenia krwi w nogach, szczególnie w okolicach podudzi. Lepkość i gęstość wyrobu medycznego VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca są odpowiednio dobrane do masażu kończyn dolnych. Masaż kończyn dolnych należy wykonywać ruchami posuwistymi z dołu do góry. Następuje wtedy aktywacja zastawek żylnych i poprawa krążenia. Tak wykonywany masaż niweluje objawy zaburzeń mikrokrążenia w kończynach dolnych - ból, obrzęk i uczucie ciężkości. Masaż należy wykonywać, aż do pojawienia się pierwszych oznak wchłaniania i zaniku żelu. Właściwości fizyczne VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca zapewniają efekt terapeutyczny. Główne składniki żelu to woda, alkohol, mentol, olej rycynowy, środek żelujący i ekstrakt z kasztanowca. Jego unikalny skład chemiczny decyduje o lepkości i gęstości żelu i w ten sposób zapewnia wystarczający poślizg podczas masażu. Dodatek kasztanowca daje również wtórny efekt w postaci przyjemnego i odprężającego zapachu.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca

**Uwagi:**

- Instrukcję stosowania VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca należy traktować jako część wyrobu medycznego.
- Niniejsza instrukcja stosowania powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca.

**Opis wyrobu medycznego / wskazania do stosowania:**

Wyrób medyczny VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca przeznaczony jest do leczenia, łagodzenia bólu i obrzęku nóg związanego z zaburzeniami mikrokrążenia krwi w nogach (tzw. ciężkie nogi).

Wyrób medyczny VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca przeznaczony jest dla szerokiego grona użytkowników, bez żadnych specjalnych ograniczeń co do czasu stosowania.

**Opis mechanizmu działania VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca, pod względem właściwości i oczekiwanych korzyści klinicznych:**

Wyrób medyczny VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca posiada odpowiednie właściwości poślizgowe, ze względu na swoją lepkość i gęstość. Te parametry zapewniają optymalne przenoszenie sił podczas masażu, co wpływa pozytywnie na

**Sposób użycia:**

Żel przeznaczony jest do użyciu zewnętrznego. W razie potrzeby nanieść odpowiednią ilość żelu na dłoń, w zależności od wielkości masowanej powierzchni. Masaż należy wykonywać kilka razy dziennie do pierwszych oznak wchłaniania żelu. Masaż najlepiej jest wykonywać ruchami posuwistymi z dołu do góry podudzi. Po ustąpieniu objawów żel można stosować jeszcze przez kilka dni.

**UWAGA: stosowanie wyrobu medycznego VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca chroni skórę przed otarciami i innymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas masażu bez użycia środka poślizgowego.**

**Przeciwwskazania:**

- Uczulenie na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

### Ostrzeżenia:

- Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na błony śluzowe i do oczu.
- Nie używać, jeśli plomba na tubie jest uszkodzona.
- Podczas stosowania VENO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem kasztanowca nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych, takich jak: uczulenia, zwiększenie bolesności, itp. Lekkie podrażnienie skóry (swędzenie) u osób nadwrażliwych nie jest przeciwwskazaniem do stosowania.
- Każde poważne działanie niepożądane, które wystąpiło w związku ze stosowaniem wyrobu medycznego należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego ([www.urpl.gov.pl](http://www.urpl.gov.pl)).

### Skład:

25 % Alcohol Denat., 6 % Aesculus Hippocastanum Seed Extract, 1 % Lubrajel Oil (Glycerin, Glycerol Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer), 0,7 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 0,5 % Menthol, 0,2 % Camphor, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Cinnamal, Citral, Eugenol, d-Limonene, Linalool, CI 19140, CI 15985, CI 28440, CI 73015, CI 14720.

### Warunki użytkowania, przechowywania, transportu i usuwania:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy, a następnie zutylizować.

Produkt można usunąć przez rozcieńczenie wodą i spiukanie.

### Opakowanie:

Tuba 75 g

### Wytwórca:

ALPA, a.s.  
Hornoměstská 378  
594 01 Velké Meziříčí  
Republika Czeska  
[www.alpa.cz](http://www.alpa.cz)

### Dystrybutor:

Alpa Dystrybucja  
33-112 Tarnowiec  
ul. Akacjowa 5  
Polska

### Objaśnienie użytych symboli:



Wytwórca

Przeczytaj instrukcję stosowania



Numer serii produkcyjnej



Data ważności



Chronić przed światłem słonecznym



Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy



Zakres temperatur przechowywania i transportu



Wyrób medyczny

Instrukcja użytkowania, rev. 3.0, data 25.05.2021